

PT 21 : guide d'utilisation

FONCTION APPEL INFIRMIERE ET COMMANDE D' ECLAIRAGE

LA FONCTION APPEL INFIRMIERE

Veillez appuyer sur le bouton rouge du terminal Patient. Le bouton rouge va s'éclairer et le personnel soignant sera prévenu.

Le terminal patient est sur son support mural, le personnel soignant peut entrer en phonie avec vous et vous pouvez directement lui répondre.

Le terminal patient n'est pas sur son support mural, ou vous désirez que personne n'écoute la conversation, prenez le Terminal Patient comme un téléphone.

Autre cas : Si le personnel soignant vous appelle, prenez le terminal et appuyez sur le bouton rouge pour pouvoir parler.



LA FONCTION COMMANDE D' ECLAIRAGE


Éclairage de la Chambre : Appuyez sur le bouton avec la grosse ampoule jaune.

Éclairage de Lecture : Appuyez sur le bouton avec la petite ampoule jaune.




AVANT DE COMMENCER ...

MISE EN PLACE DE LA CARTE

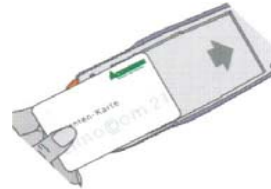



Insérez la carte dans son logement au dos du Terminal Patient en la faisant glisser jusqu'à sa butée.

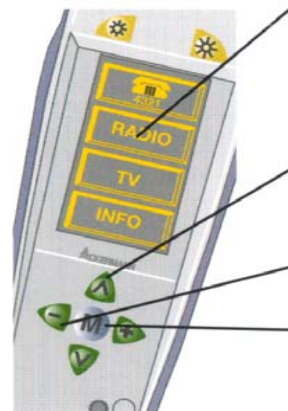COMMENT UTILISER LE TERMINAL PATIENT



Avec les touches de l'écran tactile, vous pouvez activer des fonctions (ex : la Radio). Si l'écran est éteint, appuyez légèrement pour l'activer.

Avec les touches  , vous pouvez passer à l'écran suivant (ex : canaux radio).

Avec les touches  , vous modifiez le volume sonore.

Avec la touche , vous revenez au début des menus pour pouvoir choisir par exemple d'autres fonctions.

PARAMETRAGE DE LA SONNERIE DU TELEPHONE







Pour modifier le volume sonore de la sonnerie du téléphone, veuillez appuyer sur les touches suivantes :



FONCTION TELEPHONIE


POUR APPELER UN CORRESPONDANT


Appuyer sur :

- 1)  Si vous ne trouvez pas ce bouton sur l'écran, appuyez sur  .
- 2)  Saisir le numéro de téléphone. Pour une communication vers l'extérieur, saisir le préfixe si nécessaire (ex « 0 »). En cas d'erreur de saisie :  .
- 3)  Le Terminal Patient numérote.
- 4) Vous raccrochez la ligne en appuyant sur  .

VOUS RECEVEZ UN APPEL TELEPHONIQUE





Si le Terminal Patient est sur son support mural, prenez le, et vous pouvez directement parler.

Sinon, appuyez sur la touche  pour prendre la communication.

Vous raccrochez la ligne en appuyant sur  .

VOUS RECEVEZ UN APPEL EN ABSENCE






Pendant votre absence, vous avez reçu un appel. Le terminal patient vous affiche le symbole suivant après la touche de téléphone. Appuyez sur :

- 1)  Vous apercevez le numéro du correspondant sur la touche du haut.
- 2)  Maintenant vous avez sélectionné le numéro à appeler.
- 3)  Le terminal patient
- 4) Vous raccrochez la ligne en appuyant sur  .

FONCTION RADIO

CHOISIR UN CANAL RADIO


Appuyer sur :

- 1)  Vous entendrez la dernière station sélectionnée. Si vous ne trouvez pas ce bouton sur l'écran, appuyez sur .
- 2)   Ces boutons de changement de pages d'afficher les autres stations disponibles.
- 3)  Exemple de canal radio qui peut être sélectionné en appuyant sur la touche.

Maintenant vous pouvez écouter la radio


POUR ETEINDRE LA FONCTION RADIO


Appuyer sur :

-  Il suffit d'appuyer sur le canal radio en vidéo inverse pour couper la diffusion musicale.

POUR MODIFIER LE VOLUME SONORE

Appuyer sur :






-  En appuyant sur ces boutons vous modifier le volume sonore de la radio

Si vous êtes perdu dans les menus ou si vous désirez revenir au menu principal, appuyez sur .

FONCTION TELEVISION


CHOISIR UN CANAL DE TELEVISION

Appuyer sur :

- 1)  Si vous ne trouvez pas ce bouton sur l'écran, appuyez sur .
- 2)   Ces boutons de changement de pages d'afficher les autres chaînes disponibles.
- 3)  Exemple de chaîne de télévision qui peut être sélectionnée en appuyant la touche.


POUR ETEINDRE UNE CHAINE DE TELEVISION


Appuyer sur :

-  Il suffit d'appuyer sur la chaîne de télévision en vidéo inverse pour couper la diffusion.

POUR MODIFIER LE VOLUME SONORE

Appuyer sur :





-  En appuyant sur ces boutons vous modifier le volume sonore de la télévision.


Si vous êtes perdu dans les menus ou si vous désirez revenir au menu principal, appuyez sur .

AUTRES FONCTIONS

COMMANDE DE VOLETS ROULANTS

Appuyer sur:

- 1)  Si vous ne trouvez pas ce bouton sur l'écran, appuyez sur .
- 2)   Vous pouvez faire monter ou descendre les volets. Le bouton sélectionné devient clair. **Pour stopper le déplacement du volet, il faut appuyer sur le même bouton.**

Si vous êtes perdu dans les menus ou si vous désirez revenir au menu principal, appuyez sur .